



平成 21 年 12 月

No. 09122801

お客様各位

株式会社 タウンズ

鼻腔用 BR スワブ E 折損防止に関するお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社キットにつきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、最近になり、弊社キット付属の鼻腔用 BR スワブ E を用いて患者様の鼻腔から検体を採取する際に、ごくまれに、スワブの先端部が折損するという事例が報告されております。

鼻腔用 BR スワブ E の使用については、添付文書において、以下の点につき、特に注意するようお願いしております。

- ・ 検体の採取にあたり、鼻腔用 BR スワブ E に破損や折れ曲がり、部分的な白化、汚れがあった場合には使用しないこと
- ・ スワブの軸部分（特に軸の細い部分）に力がかかり過ぎたり、強く押したり、過度の振れ負荷がかかるような使い方をしないこと
- ・ スワブの軸を曲げる、反らす、折るなど意図的な操作を加えないこと

お客様各位におかれましては、上記事項を再度ご確認ください、鼻腔用 BR スワブ E が折損しないように十分に注意して検体採取を実施していただきますよう、何卒よろしく願い申し上げます。

敬具

《 本件に関するお問合せ先 》

株式会社タウンズ 営業本部

電話番号:0120-048-489 または 055-929-0471

FAX 番号 : 055-929-0472

お問合せフォーム : <http://www.tauns.co.jp/contact.php>

住所 : 〒410-0005 静岡県沼津市双葉町 9 番 12-2 号