

お客様各位

「スワブ輸送用チューブ」 新発売および 「スポンジスワブ輸送用チューブ」 終売のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、イムノエース・キャピリアシリーズ製品をご愛顧賜り、心より御礼申し上げます。

さて、この度弊社では、「スワブ輸送用チューブ 10本/50本」を発売することとなりました。これに伴い、現在販売中の「スポンジスワブ輸送用チューブ 10本」は、在庫限りで終売とさせていただきます。

終売となる「スポンジスワブ輸送用チューブ」と後継品の「スワブ輸送用チューブ」は、**名称違いの同一製品**となりますので汎用のスワブ輸送用チューブとして、引き続きご愛顧の程、宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

■ 発売スケジュール

□ 受注開始日：2020年 11月 2日 (月) □ 初回出荷日：2020年 11月 6日 (金) □ 発売日：2020年 11月 9日 (月)


■ 製品詳細

カタログ番号 (JANコード)	製品名	包装	希望小売価格 (税別)	
ACSW7015 (4987815070151)	スワブ輸送用チューブ 10本	10本	1,000 円	
ACSW7016 (4987815070168)	スワブ輸送用チューブ 50本	50本	3,500 円	
製品画像 (キャップ装着時)				
個装サイズ (実寸)	<10本> [W] 125mm × [D] 180mm × [H] 14mm (10本/袋) <50本> [W] 160mm × [D] 240mm × [H] 70mm (10本/袋 × 5)			
元梱入り数	<10本> 80袋 <50本> 14袋	有効期間	なし	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・本製品は未滅菌 ・弊社販売の「鼻腔用滅菌綿棒 110本」は装着不可 	貯蔵方法	室温	


■ 販売終了製品 (在庫終了次第)

カタログ番号 (JANコード)	製品名	包装	希望小売価格 (税別)	
ACSW7014 (4987815070144)	スポンジスワブ輸送用チューブ 10本	10本	1,000 円	


■ 輸送用チューブの使用方法

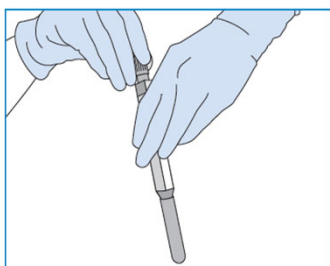

①輸送用チューブからキャップを取り外す。

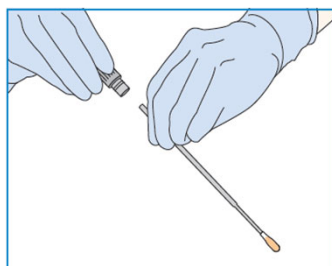


②キャップの穴に、検体採取済みのスワブの持ち手部分を装着する。

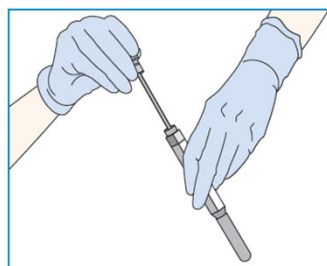

③キャップを装着したスワブをチューブに収める。

■ 検体採取時

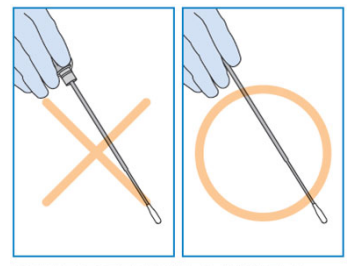

注意:スワブを装着した輸送用チューブのキャップを持っての検体採取は、スワブが外れる恐れがあるため、行わないでください。